

# **Zdravo, mi smo Kiwitas<sup>srb</sup>**

---

**Uputstvo za upotrebu.**

**PLATANOMELÓN**

# Karakteristike



Super upijajuće: za obilne menstrualne cikluse.



Ponovo upotrebljive, nisu za jednokratnu upotrebu.



Sa patentiranom antibakterijskom tehnologijom. Eliminiraju bakterije koje uzrokuju neprijatne mirise i infekcije.



Eliminiraju vlagu.

# Instrukcije

## Namena proizvoda:

Kiwitas su super-upijajuće menstrualne gaćice koje su mekane, udobne i elastične.

## Uputstvo za pravilnu upotrebu:


- Obucite ih i osetite mekoću organskog pamuka na svojoj koži. Savršeno se prilagođavaju vašem telu zahvaljujući njihovoj elastičnosti!
- Možete ih nositi do 10 sati bez neprijatnih mirisa! Međutim, kao i kod svakog menstrualnog proizvoda, to će u velikoj meri zavisiti od količine krvarenja. Menstrualne gaćice mogu upiti do 50ml menstruacije, vaginalnog iscetka ili curenja (ekvivalent su im 3 obična uloška). Menstrualni tanga može zadržati do 30ml menstruacije, vaginalnog iscetka ili curenja i jednaka je 1 običnom ulošku.
- Skidanje: koliko dugo ih možete nositi zavisice od faze menstrualnog ciklusa u kojem se nalazite i od menstrualnog toka.
- Operite gaćice ručno ili u mašini na maksimalnoj temperaturi od 30°C. Ne zaboravite da ne koristite izbeljivač, omekšivače, Marsejski sapun ili sapune koji sadrže prirodna ulja.

## Sastav:

Napravljene od 95% organskog pamuka i 5% elastina.

## Mogući rizici povezani sa upotrebom:

- Ovaj proizvod je za ličnu upotrebu. Ne delite ga kako biste sprečili širenje infekcija.
- Važno je da se za čišćenje proizvoda ne koriste abrazivna sredstva ili jaka dezinfekciona sredstva koja sadrže supstance na bazi nafte, ulje čajevca, alkohola ili izbeljivače.
- Za pravilno održavanje proizvoda, preporučuje se da se čuva na suvom mestu, daleko od prašine i direktnog sunčevog svetla.
- Držati van domašaja dece.

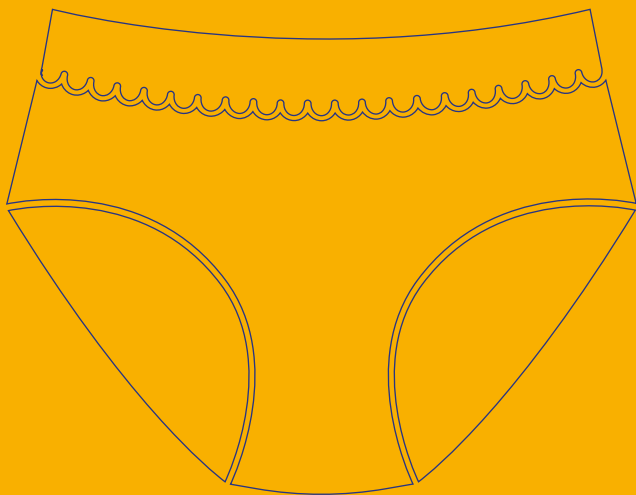

---

**PLATANOMELÓN**